

HIGHRISER®

Løfte/hvilestol

Modell: EP100-EP200-EP300-EP500



Bruksanvisning

Ergopluss™

P.B.193, Havik
4553 Farsund

www.ergopluss.no

INTRODUKSJON

Gratulerer med ditt valg av *Highriser®* Elektrisk løfte/hvilestol. *Highriser®* er utviklet i samarbeid med ergoterapeuter. Og er blant det ypperste av løfte hvilestoler på markedet. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk av stolen. Vennligst les den nøye før bruk og vær sikker på at du har skjønnet innholdet i denne manualen.

MERK: DENNE BRUKSANVISNING INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON PÅ SIDE 6 VEDR FØRSTE GANGS BRUK.

SPESIFIKASJONER:

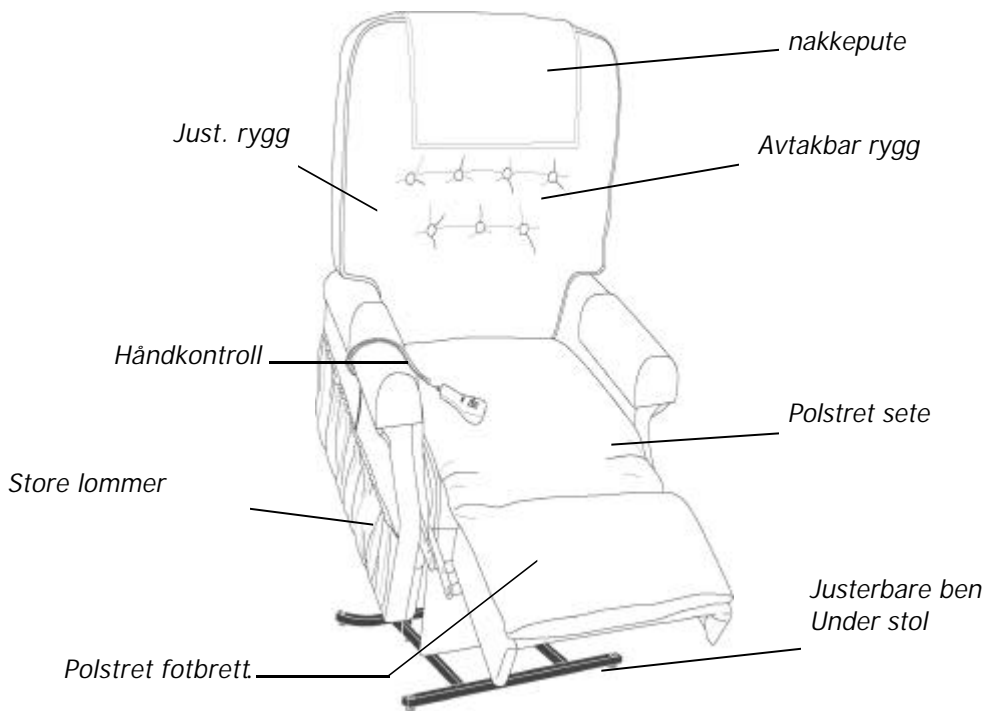


fig. 1

FORSIKTIGHETS REGLER

- ☞ Sett ikke stol nærmere enn 50 cm fra vegg
- ☞ Les denne bruksanvisningen før bruk
- ☞ Ikke la barn leke med stolen

FIG 1.**Highriser mod. EP100-EP200 og EP500** er

identiske i bruk.

De er utstyrt med et svært brukervennlig bryterpanel. (A4) For å få stolen til og reise seg presser man enkelt bryteren (A3) fremover, og for å legge stolen tilbake skyves bryteren (A3) bakover.

De fleste blir fort fortrolig med dette systemet

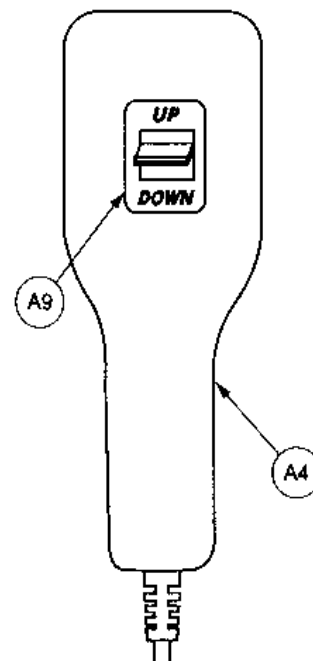


Fig 1.

FIG 2.**Highriser modell EP300**

Dette er en to motors utgave og har derfor en mer avansert håndkontroll.

Med denne stolen kan for eksempel ryggen legges ned uten at fot hviler følger med.

Systemet er likevel det samme.

Håndkontrollen (B6) er enkel å betjene.

Med bryteren (B10) kjører man rygg eller fotbrett opp eller ned, bryteren (B8) bestemmer hvilken del man kjører.

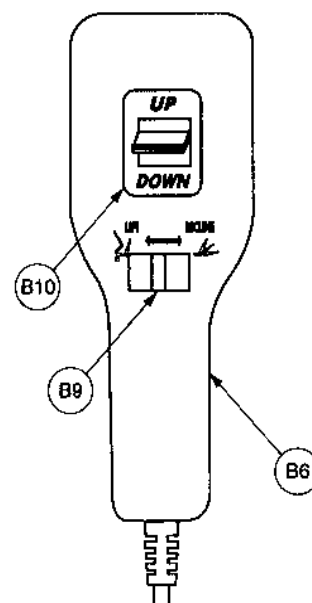


Fig 2.

Daglig bruk:**Trekk:**


Alle trekk levert med Highriser er vaskbare og vaskes på 60 grader.

Regulerbare ben:

Alle ben på Highriser er justerbare, dette er spesielt bra om stolen står delvis på et teppe.

Nakke pute:

Nakke pute er regulerbar i høyde og tykkelse

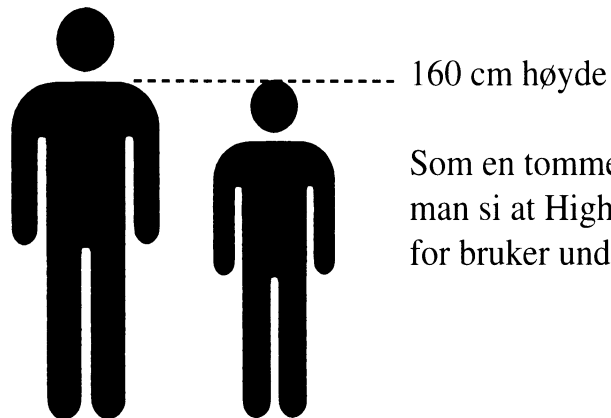

Som en tommelfingerregel kan man si at Highriser II passer for bruker under 160 cm.

Highriser leveres med følgende som standard:

- ↳ Løse armtrekk.
- ↳ Løst setetrekk.
- ↳ Regulerbare ben for ujevne underlag.
- ↳ 2 store sidelommer.
- ↳ Nakkepute.
- ↳ 2 stk 9 volt backup batterier.

Highriser stolene har følgende tilleggsutstyr.

- ↳ Inkontinenstrekk
- ↳ Svingplate
- ↳ Hjul (2 stk med brems og 2 stk uten) **MERK: stol skal da ikke brukes som rullestol, hjul settes på før og enklere flytte stol ved rengjøring under stol !**

ENKEL FEILSØK

Highriser løftestoler er svært driftsikre.

Skulle stolen mot formodning ikke virke sjekk følgende:

Er kontakt i veggen ?


Er alle plugger ordentlig satt i (bak på stol)?

Om ikke feilen er funnet nå, ta kontakt med din lokale forhandler.

Hjerteavlastning og Blodsirkulasjon.

Highriser stolene tilhører det fåtall av stoler som utmerker seg til bruk ved drenasje: Fothvileren hever seg omtrent til hjertehøyde.

Highriser III 3-posisjons stol kan legges helt ned til flatt leie.

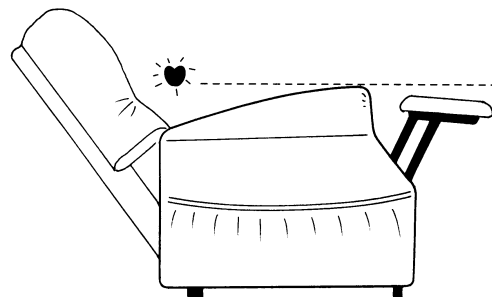

HOVED FUNKSJONER



1. Oppreist



2. Sittende




3. Liggende

MERK !

Vinkelen mellom sete og rygg er alltid konstant på modellen EP100-EP200 og EP500 uansett stilling og funksjon.


Vinkelen mellom sete og rygg på Highriser III kan justeres etter behov.

Innstillinger

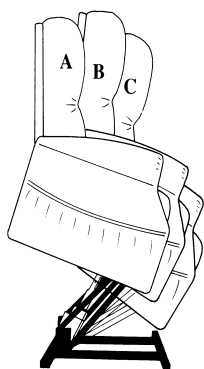

Setets vinkel i forhold til horisontalplanet

Stolene leveres i innstilling B

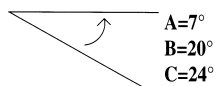

A=7°
B=20°
C=24°

Justering av løfte vinkel.

Med noen få håndgrep kan man justere løftehøyde og vinkel på stolen i oppreisningsfunksjonen. Dette er enkelt å utføre og krever ikke noe spesielt verktøy.

INNSTILLING (A) Hvis du ønsker et flatere og eventuelt høyere løft.

INNSTILLING (B) Det er denne stillingen stolen leveres i.

INNSTILLING (C) Hvis du ønsker et krappere og lavere løft.

TEKNISKE DATA:

SPESIFIKASJON	Highriser 1 EP100	Highriser II EP200	Highriser III EP300	Highriser Big EP500
Sete Høyde	47 CM	46 CM	48 CM	48 CM
Sete Dybde	50 CM	42 CM	50 CM	60 CM
Sete Breddde	52 CM	45 CM	52 CM	62 CM
Rygg Høyde	70 CM	66 CM	70 CM	70 CM
Total Breddde	77 CM	69 CM	77 CM	96 CM
Vekt	50 KG	45 KG	64 KG	68 KG
Løftekapasitet	130 KG	130 Kg	130 KG	210 KG
Antall motorer	1	1	2	2

Alle Highriser modeller er merket, og tilfredstiller DIREKTIV 93/42/EØF om medisinsk utstyr. Highriser programmet er sertifisert av **Instrument Specialties** og Teknologisk Institutt

Highriser løftestoler er testet og godkjent etter følgende standarder:

Antennelighet: EN597-1, EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5854

Styrke og holdbarhet: EN1728

Stabilitet: NS-EN1022

EMC: EN60601-1-2



MERK: VIKTIG INFORMASJON VED FØRSTE GANGS BRUK

Highriser stolene leveres med 2 stk 9 volt batterier. Disse batteriene er pakket sammen med denne bruksanvisningen.

Ved mottak av stol må disse monteres på motor under stol.

Batteriene sikrer mot strømstans og gir 1 til 2 løft.

Batteri drift er en nød løsning og sikrer at man ved strømstans kan komme ut av stolen, batteriene må byttes etter bruk.

MERK: Batteriene gir ikke mulighet til vanlig bruk av stol.

MONTERINGSANVISNING SVING UNDERSTELL

1. Demonter rygg. (gjelder modellene I og II)
2. Legg stolen opp ned på et rent og plant underlag. (modell III legges på rygg)
3. Legg sving understell på stol rammen, låser skal peke fremover.
4. Posisjoner sving rammen helt bak på understell. (se fig.1)
5. Forbor de 4 hullene med et 2,5 mm bor, sett i de medfølgende 4 skruer.
6. Sett i støpsel og kjør stolen opptil du klarer og vri låser på plass.
7. Demonter stolrammens ben og sett på de 4 medfølgende muttere.
8. Legg stolen på rygg og monter svingplate.
9. Snu stol slik at den står på svingplaten.
10. Kjør stolen opp i oppreist stilling, monter låsemutter på senterbolt, kjør stolen ned og juster låser. Stolen skal låse etter ca 5-6 cm løft.
11. Juster stol rammens bens slik at disse er 3-4 mm fra underlaget lås med muttrene.

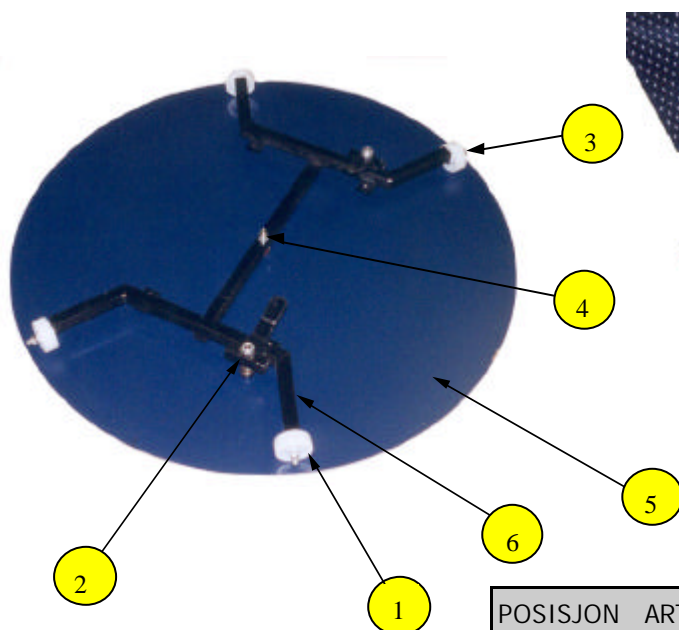
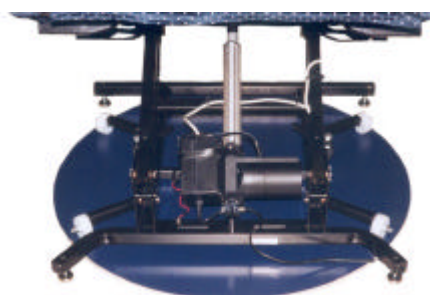


Fig.1

POSISJON	ART.NR	ART.NAVN	ANTALL
1		TRINSE	4
2		LÅSER	2
3		8MM MUTTER	4
4		8MM MUTTER	1
5		SVINGPLATE	1
6		UNDERSTELL	1

GARANTI INFORMASJON

Highriser® Løfte/hvilestol er garantert fri for feil og mangler i to år, dette gjelder ikke vanlige slitedeler på stoff og lignende og heller ikke feil som oppstår p.g.a feilbruk .

⇨ **Viktig!** - Forandringer og tilpasninger som ikke er gjort og godkjent av Ergopluss vil virke inn på garantien.

Modell:

Serie.nr:

Forhandler info:

Ergopluss AS
P.B.193, Havik
Tel:38 39 57 00
Fax:38 39 16 44
www.ergopluss.no

Ergopluss AS er ikke ansvarlig for skader påført bruker eller løftestol som kommer av feil bruk av hjelpemiddelet.