

Størrelser i cm	Contur Classic Artikkel nr:	Contur Basic Artikkel nr:	Inkotrekk Artikkel nr:	Varetrekk Artikkel nr:
35X35	513535	453535	463535	503535
38X40	513840	453840	463840	503840
40X40	514040	454040	464040	504040
40X45	514045	454045	464045	504045
43X45	514345	454345	464345	504345
43X40	514340	454340	464340	504340
45X40	514540	454540	464540	504540
45X45	514545	454545	464545	504545
45X50	514550	454550	464550	504550
47X50	514750	454750	464750	504750
50X45	514045	454045	464045	504045
50X50	515050	455050	465050	505050
55X45	515545	455545	465545	505545
55X50	515550	455550	465550	505550
55X55	515555	455555	465555	505555

Forhandler info

Ergopluss AS

P.b.193, Havik

4553 Farsund

Tel: 38 39 57 00


Fax: 38 39 16 44

www.ergopluss.no

Ergopluss™

Contur classic

Sittepute

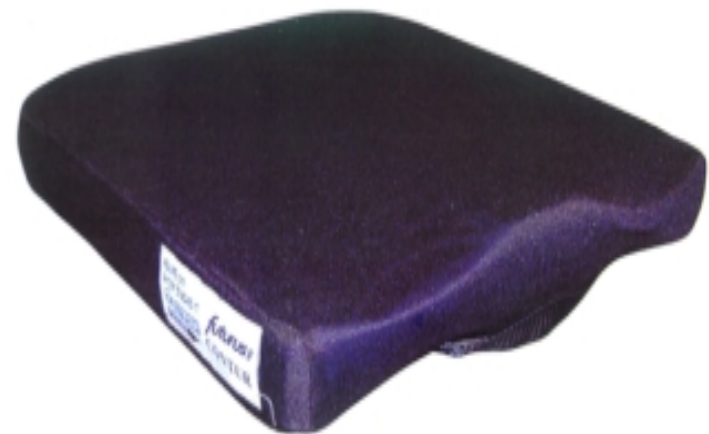

Bruksanvisning

BRUKSANVISNING.

INNLEDNING.

Contur Basic og Contur Classic er CE-merket og brann testet. Contur Basic er en enkel sittepute med overtrekk. Contur Classic er en sittepute med overtrekk, og avtakbart og vaskbart inkotrekk.

BASEN.

Contur sittepute er utformat for å gi brukeren en god sittekomfort, samtidig som den gir god trykkavlastning ved lengre tids sitting. Sitteputen er oppbygd av en konturert kaldskumskjerne med riktig hardhet for å gi god stabilitet og lang livstid på produktet. En innstøping av tregelastisk skum i sitteputenes bakre del bidrar til at sittebensknottene synker ned og blir avlastet. Contur putens konturering og hardhet er vel avpasset for å gi god trykk utjevning og avlastning på lårene.

RENGJØRING.

Basen kan reingjøres med alkoholholdig væske, eller såpe og vann.

TREKKET.

Trekket kan vaskes i 60 ° i maskin, og kan tørke- tromles. Trekket er av polyester som er tøybart i fire retninger. Det er velcro bånd på undersiden. Standard trekket er ikke inkontinens tett. Skulle en sittepute med inkontinens beskyttelse være nødvendig brukes Contur Classic. Inkontinens trekket kan vaskes i 95° og tørkes i tørketrommel. Det finnes merking på trekkets høyre side. Ved smittefare se også Statens Legemiddelkontroll's retningslinjer for desinfeksjon.

Vi ønsker her å gi deg noen råd for å unngå misforståelser.

NOEN GODE TIPS!

Les denne brukerveiledningen før utstyret tas i bruk. Feilaktig bruk kan medføre skade på utstyr og bruker. Utstyret må sjekkes for defekter ved mottak. Eventuelle defekter må snarest rapporteres til distributør. Temperatur for lagring og transport må være mellom 5° og 45° Celsius. Fuktighet må ligge mellom 10 og 80%. Sitteputen systemet bør benyttes under anvisning av kyndig personell første gang. Det er viktig at bruker tidvis reposisjoneres. Maksimum brukervekt er 150 kg.

CONTUR sitteputene system er utviklet for å forebygge trykk sår. Prinsippet er bygget på at sitteputen har en skum base, i denne skumbasen er det satt inn en viskoelastisitet skum. Dette partiet er plassert der hvor trykket er størst, ved sittedelens ben knoter.

Contur Basic består av: 1) Sittepute 2) To trekk

Contur Classic består av: 1) Sittepute 2) To trekk 3) Inkotrekk

TA SITTEPUTEN I BRUK.

Kontrollere at sitteputen er hel. Legg puten med den plane siden ned. Plasser sitteputen med den runde kanten bakover (der hvor glidelåsen er plassert) Om du bruker sitteputen i en ekstrem "hengekøye" stol, kan det med fordel legges inn en skive i puten, eller at stolen har et plant sete.